

CACILIQ20® RGTA® Kit de cicatrisation cutanée pour plaie chronique Régénération par thérapie matricielle	FR			CACILIQ20® RGTA® Cutaneous chronic wound healing kit Matrix therapy for regeneration	EN	
MODE D'EMPLOI				INSTRUCTIONS FOR USE		
(Composition)				(Composition)		
<p>Sel de sodium de 1-6 poly (carboxyméthylglycine sulfate) 0.1 mg/mL, chlorure de sodium 9 mg/mL, hydroxyde de sodium pH de 6.5 +/- 0.5, eau purifiée aop. Un kit à usage unique est composé d'un flacon de solution stérile de CACILIQ20® et d'un blister contenant une compresse stérile et deux pinces stériles.</p>				<p>Sodium salt of a 1-6 poly(carboxymethylglycine sulfate) 0.1 mg/mL, sodium chloride 9 mg/mL, sodium hydroxide pH of 6.5 +/- 0.5, purified water. One kit for single use consists of one vial of CACILIQ20® stérile solution and a blister pack containing one sterile gauze and two sterile forceps.</p>		
(Informations générales)				(General information)		
<p>CACILIQ20® est un protecteur de matrice tissulaire de la famille des RGTA® (ReGenerating Agents), qui favorise la régénération naturelle de la peau. Il est disponible sous 3 formes : - 1x 1.5 mL flacon de CACILIQ20® et 1 set de soin pour une utilisation unique sur une plaie de taille inférieure à 35 cm². - 3x 1.5 mL flacons de CACILIQ20® et 3 sets de soin, pour 3 utilisations sur une plaie de taille inférieure à 35 cm². - 2x 5mL flacons de CACILIQ20® et 2 sets de soin, pour 2 utilisations sur une plaie de taille comprise entre 35 cm² et 220 cm².</p>						
(Usage prévu)						
<p>CACILIQ20® est un RGTA® (ReGenerating Agent), prévu pour améliorer la guérison d'ulcères chroniques cutanés en favorisant la restauration de la matrice extracellulaire, avec pour conséquence la réduction de la douleur liée à la lésion.</p>						
<p>Il est indiqué pour les ulcères chroniques cutanés de pression, causés par une maladie artérielle périphérique (par exemple un stade IV dans la classification de Leriche et Fontaine), ou par le diabète (y compris l'amputation), ne montrant aucune tendance à la guérison après 6 mois de soins habituels ou persistant après 12 mois.</p>						
(Traitement)						
<p>CACILIQ20® est destiné à être appliqué deux fois par semaine (tous les 3 à 4 jours), idéalement lors du changement de pansement. Une utilisation plus fréquente peut réduire l'effet thérapeutique. Les résultats peuvent varier d'un patient à un autre, votre médecin peut adapter la durée du traitement en conséquence. Les résultats doivent normalement être visibles dans les 3 mois d'utilisation.</p>						
(Consuls d'utilisation)						
<p>Des précautions normales d'hygiène doivent être respectées lors du traitement d'une plaie avec CACILIQ20® (par exemple se laver les mains, sort de vêtements appropriés, drag d'examen médical, ...). En cas de débridement chirurgical, respecter les bonnes pratiques cliniques pour maintenir la stérilité et éviter une contamination croisée. Utiliser sur des plaies cutanées chroniques tous les 3-4 jours (deux fois par semaine).</p>						

[illegible][illegible][illegible]

